

TEMPUR-MED®

PRODUKTY
REDUKUJĄCE
NACISK




**POZNAJ TEMPUR – NAJNOWSZĄ
TECHNOLOGIĘ
PRZECIWDZIAŁAJĄCĄ
POWSTAWANIU ODLEŻYN**



DLACZEGO TEMPUR® JEST INNY?



TEMPUR jest otwartokomórkowym, wiskoelastycznym, wrażliwym na temperaturę materiałem, który precyzyjnie dopasowuje się do kształtów ciała.

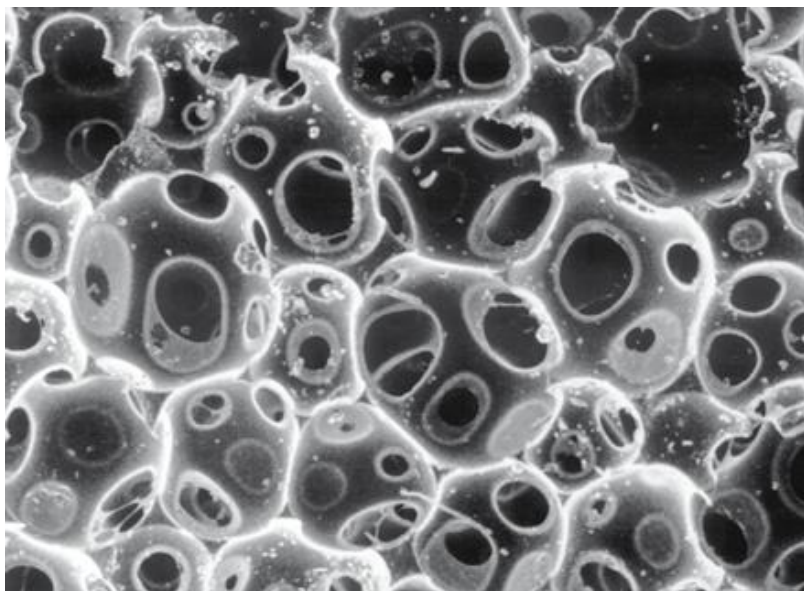

TEMPUR jest zbudowany z miliardów wiskoelastycznych, otwartych, sferycznych komórek. Komórki te reagują na temperaturę ciała oraz wagę i następnie zmieniają swoje ustawienie tak, aby precyzyjnie dopasować się do kształtów ciała pacjenta. Otwartokomórkowa struktura pozwala na cyrkulację powietrza.

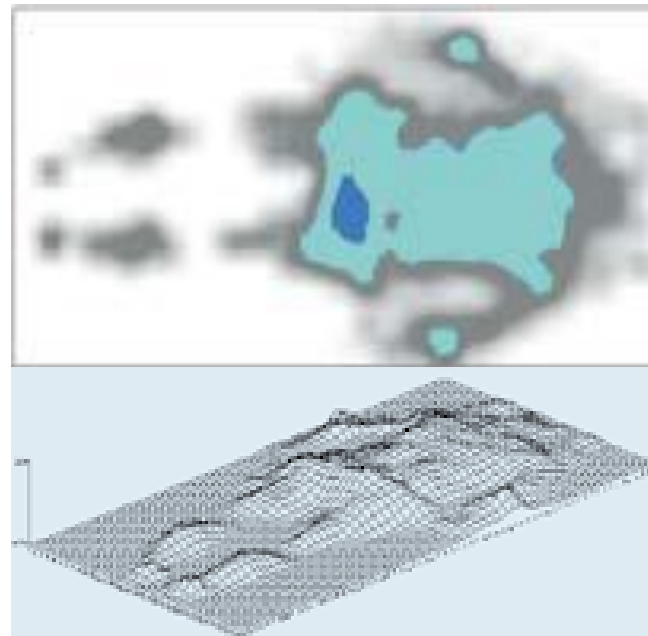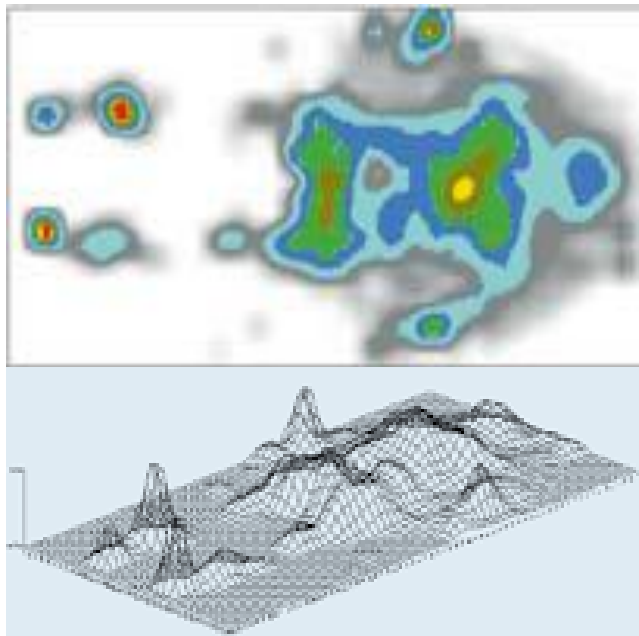

PORÓWNANIE ROZŁOZENIA NACISKU PRZETWORZONE KOMPUTEROWO

Jasnoniebieski oraz niebieski pokazują obszary małego nacisku. Żółty, pomarańczowy i czerwony pokazują miejsca, w których ciało jest narażone na duży, uciążliwy nacisk. Po osiągnięciu pewnej granicznej lokalnej wartości nacisków (28-45 mmHg czyli 3,6-5,9 kPa), dochodzi do zamknięcia najmniejszych naczyń krwionośnych. Na materacach Tempur, wartość nacisku jest stała i wynosi 1,5 kPa.



Wszystkie produkty TEMPUR-MED są pokryte wodoodporną, oddychającą powłoką. Powłoka poliuretanowa posiada bardzo szczelne szwy zapobiegające przeciekom. Powłoka bardzo łatwo się zdejmuje, można prać ją mechanicznie (95° C), łatwo się ją czyścić, dezynfekuje oraz sterylizuje za pomocą środków czyszczących powszechnie używanych w szpitalach.

UREGULOWANIA PRAWNE

Wszystkie produkty TEMPUR-MED z powłoką poliuretanową są zgodne z następującymi normami:
Dyrektywa 93/42/EWG o Wyrobach Medycznych (klasa pierwsza wyrobów medycznych)
Brytyjskie przepisy dotyczące norm bezpieczeństwa BS EN 597, część 1 i 2, BS6807 oraz BS 7177



TESTY ORAZ BADANIA KLINICZNE TEMPUR-MED

LEPSZY PRZEPIŹYW KRWI ORAZ NATLENOWANIE

Spektroskopia laserowa pokazała, że natlenowanie hemoglobiny u pacjentów leżących na materacach TEMPUR przez trzy godziny nie zmieniło się. W porównaniu do innych powierzchni, TEMPUR zapewnia lepszy ilościowo i jakościowo przepływ krwi. Podczas leżenia na materacu TEMPUR zanotowano wzrost przepływu krwi o 10-15%. Natlenowanie hemoglobiny wynosiło 60% w porównaniu do 40% w przypadku leżenia na standardowym materacu.



PRODUKTY TEMPUR-MED

NAKŁADKI NA MATERAC



MATERACE



PODUSZKI



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEMPUR-MED?



LEPSZA OCHRONA TO OSZCZEDNOSC PIENIEDZY

Materace TEMPUR-MED zapewniają rozwiązanie polegające na przeciwdziałaniu powstawaniu odleżyn, a ich trwałość oznacza, że będą wymagały rzadszej wymiany niż standardowe materace szpitalne.

ODWRACANIE MATERACY NIE JEST KONIECZNE

Materace TEMPUR nie wymagają odwracania. Zmniejsza to zakres możliwości wystąpienia urazu podczas użytkowania materaca w porównaniu z materacem konwencjonalnym, który wymaga odwracania, aby uniknąć zapadnięcia.

KORZYSCI Z ZAPOBIEGANIA

Właściwości materaca TEMPUR-MED zapobiegające powstawaniu odleżyn zmniejszają konieczność wynajmowania drogich systemów zmiennociśnieniowych. Materace mogą być stosowane u wszystkich grup pacjentów, zarówno tych obciążonych wysokim jak i niskim ryzykiem, ponieważ zapewniają one wsparcie dla całego ciała, redukując w ten sposób ryzyko wystąpienia odleżyn.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ



SEN I ZDROWIE

+48 (58) 67 04 344

+48 530 004 344

salon@senizdrowie.pl

BOŻENA GLANC, JOANNA ZOMMER